

Das High-Tens-Gerät zur medikamentenfreien Schmerzbehandlung

MEDRELIF® Schmerzbehandlungsgerät High-Tens MR-400

Dieses moderne, geprüfte elektrotherapeutische Medizin-gerät arbeitet nach den neuesten medizinischen Erkenntnissen mit individuell steuerbarer 2-Kanal Technik.

Mit wohlthuender, elektronisch gesteuerter Nervenstimulation können schmerzende und verspannte Körperpartien behandelt werden.

Ideal bei:

- schmerzhaften, auch berufs- oder sportbedingten Verspannungen/Zerrungen (Rücken, Nacken, Schulter)
- Tennisarm, Verstauchungen
- Ischias, Hexenschuss, Neuralgien
- Migräne
- Menstruationsbeschwerden
- posttraumatischen und postchirurgischen Schmerzen
- Kiefergelenkschmerzen

MEDRELIF® Schmerzbehandlungsgerät

High-Tens MR-400 verfügt insgesamt über fünf Basisprogramme. Diese können außerdem noch individuell nach Wellenform, Frequenzhöhe, Impulsbreite und Intensitätsstärke geregelt werden.

So kann bei der Behandlung medizinisch sinnvoll bei leichteren oder stärkeren Schmerzen oder lästigen, unangenehmen Verspannungen oder Zerrungen ganz gezielt unterschiedlich therapiert werden.

Bei Ihrem Arzt oder Apotheker erhalten Sie weitere sachkundige Auskünfte.

Alles komplett!

In der Verkaufspackung finden Sie alles komplett für den Gebrauch:

€ 125,00*
(PZN 228600 6)



- 1 Gerät MEDRELIF® High-Tens MR-400 mit Trage-Clip
- 4 blaue selbsthaftende Elektroden (= Pads) mit Steckanschlüssen
- 2 Verbindungskabel mit jeweils einem schwarzen und einem roten Stecker
- 2 alkalische Mignon-Batterien AA 1,5V (LR 6)
- 1 detaillierte Gebrauchsanweisung

Zubehör für die separate Nachbestellung:

MEDRELIF® Ersatzelektroden MR-32E

4 Elektroden (= Pads). Zum Austausch, sobald deren Haftfähigkeit nachlassen sollte.


€ 12,40*
(PZN 271037 8)

MEDRELIF® Nacken-Elektrode MR-98E

1 großflächige Elektrode (15,2cm x 10,2cm).

Besonders gut geeignet für Schulter, Nacken und Lende.

€ 15,50*
(PZN 729196 3)

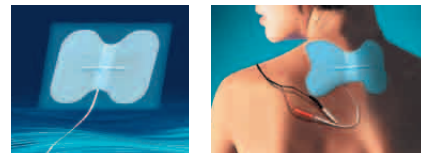

Video:

Experten-Tipp zu Medrelif.
Mit Smartphone QR-Code scannen.



interessant bei Facebook

Die erwähnten Produkte bekommen Sie unter den angegebenen Pharmazentralnummern (= PZN) in **allen** Apotheken, ferner in Prophylaxe-Shops und in ausgesuchten Fachgeschäften. Weitere Auskünfte erhalten Sie von Ihrem Zahnarzt oder Apotheker – oder direkt von:


intersanté GmbH
Wellness, Health & Beauty

Berliner Ring 163 B
D-64625 Bensheim
Telefon 06251 - 9328 - 10
Telefax 06251 - 9328 - 93
E-mail info@intersante.de
Internet www.intersante.de


*unverbindl. empf. Endverbraucherpreis zum Zeitpunkt der Drucklegung

Pain Relief 


Medrelif®

Schmerzbehandlungsgerät High-Tens MR-400


Wirkungsvolle Behandlung von Schmerzen. Ohne Medikamente.

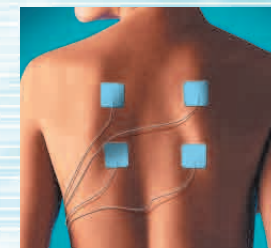


Rücken

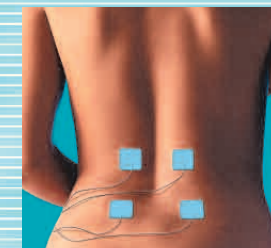

Lenden

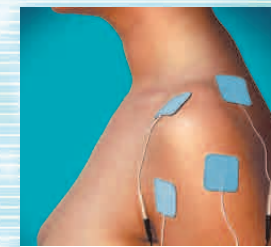

Schulter

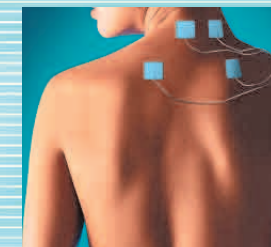

Nacken

Fortschritt dank moderner medizinischer Forschung

Eine sinnvolle Alternative in der Schmerzbehandlung: Die TENS-Methode

Unter **TENS**-Therapie, transkutane, elektrische Nerven-Stimulation, wird eine Methode zur Schmerzlinderung verstanden, deren Wirksamkeit bei zahlreichen Indikationen wissenschaftlich gesichert ist. Sie macht viele Medikamente teilweise oder sogar vollständig überflüssig.


Bei der transkutanen, elektrischen Nerven-Stimulation werden über sogenannte Elektroden (pflasterartige Aufkleber), die auf die schmerzenden Körperpartien aufgebracht werden, von einem Basisgerät aus durch die Haut gehende, d.h. transkutan, elektrische Impulse zu den Nervenbahnen transportiert. Dies hat zur Folge, dass die körpereigenen, schmerzhemmenden Systeme aktiviert, morphin-ähnliche, schmerzlindernde Substanzen (= Endorphine) ausgeschüttet und die betroffenen Körperregionen besser durchblutet werden. Man kann es sofort spüren. Und all dies geschieht ohne Medikamente und ohne lästige Nebenwirkungen.

Der technische Fortschritt und die medizinische Forschung der vergangenen Jahre haben dazu geführt, dass die Schmerzbehandlung mit **TENS** zu einem anerkannten Behandlungssystem geworden ist. Es wird weltweit bei zahlreichen Indikationen mit Erfolg in Schmerzambulanzen und von Fachärzten eingesetzt und findet durch die Empfehlung von Ärzten, Heilpraktikern, Sportmedizinern und Physiotherapeuten auch immer mehr Einzug in Privathaushalte.

Hinweis: Ein TENS-Gerät darf nicht angewendet werden von

- Personen mit implantierten elektronischen Geräten, z. B. mit Herzschrittmachern oder metallischen Implantaten, es sei denn, der Arzt hat es ausdrücklich gestattet.
- Frauen während der Schwangerschaft.
- Fahrern von Kraftwagen, von Nutz- oder Bedienmaschinen.

Anwendungsbeispiele

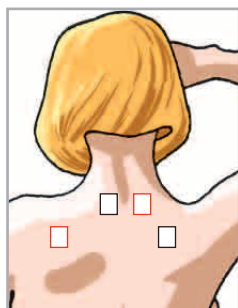


Nacken

Zwei Elektroden (= Pads) an der Basis des Halses und die anderen zwei am oberen Schulterabschnitt anbringen.



Lende

Auf beiden Seiten der Wirbelsäule in der schmerzenden Zone anbringen.

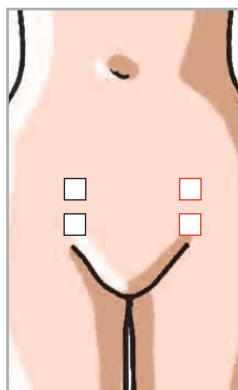

Menstruation

Bei der Nutzung beider Kanäle, die Elektroden auf dem Bauch anbringen.

Medrelif® Schmerzbehandlungsgerät High-Tens MR-400: ohne Medikamente

In der modernen medizinischen Wissenschaft wird die Schmerzbehandlung mit der **TENS**-Methode in zahlreichen Publikationen auf Grund der vielfältigen Behandlungserfolge sehr positiv bewertet. Gerade auch in Fällen, bei denen Medikamente nicht die erhoffte Wirkung zeigten, brachte der Einsatz von **TENS** nachweisliche Linderung.

Die neue TENS-Gerätegeneration, zu der **MEDRELIF® Schmerzbehandlungsgerät High-Tens MR-400** gehört, unterscheidet sich ganz wesentlich von den älteren Modellen durch das 2-Kanal-System. An Stelle von nur zwei Behandlungspunkten werden hier vier Behandlungspunkte eingesetzt. Diese Methode führt zu einer deutlich konzentrierteren und effektiveren Schmerzbehandlung, Muskellockerung und Durchblutungsförderung, als es bei einem 1-Kanal-System möglich ist. Die zentralen Vorteile sind

- **Anwendungen auf den betroffenen schmerzenden Stellen – ohne den gesamten Organismus zu belasten**
- **Steuerungsmöglichkeit nach Zeitdauer und Intensität**
- **Anwendung ohne Nebenwirkungen**
- **vergleichsweise extrem kostengünstig**

Das MEDRELIF® Schmerzbehandlungsgerät High-Tens MR-400

erlaubt wiederholte Anwendungen, die Steigerung von kleinen bis zu größeren Reizimpulsen, ohne dass unerwünschte Begleiterscheinungen oder Nebenwirkungen, die bei der Medikamententherapie auftreten können, beobachtet wurden.


Ein technisches Wunderwerk

Von außen gesehen ist das **MEDRELIF® Schmerzbehandlungsgerät High-Tens MR-400** klein, handlich und überzeugend mit seinem ansprechenden Design.

Die unsichtbaren „inneren“ Werte sind vom Feinsten. Von der modernen Hochleistungselektronik bis zu den multifunktionalen Prozessoren für optimale, problemlose Bedienung und effektive medizinische Anwendung.




Anwendungsbeispiele

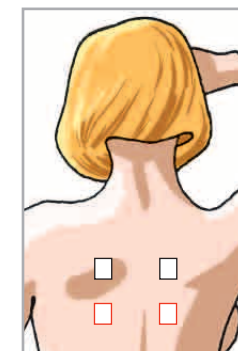


Rücken

Die Elektroden (= Pads) auf beiden Seiten der Wirbelsäule anbringen, um die gesamte Schmerzzone abzudecken.

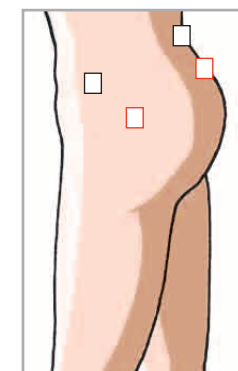

Hüfte

Die Elektroden (= Pads) eines Kanals im Lendenbereich (auf beiden Seiten der Wirbelsäule) anbringen. Die Elektroden (= Pads) des zweiten Kanals werden in der Nähe des Schmerzbereichs, direkt auf der Hüfte angebracht.

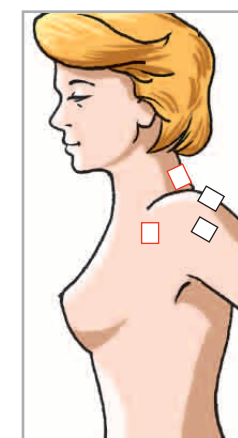

Schulter

Bei Nutzung beider Kanäle, die Elektroden (= Pads) vor und hinter der Schulter anbringen, um den gesamten schmerzenden Bereich abzudecken.

Dank des netzunabhängigen Batteriebetriebes kann das **MEDRELIF® Schmerzbehandlungsgerät High-Tens MR-400** Zuhause, im Büro oder auf Reisen angewendet werden.